

Gebrauchsanleitung NEWBORN BABY MOVER[®] von Baby-Mover B.V.

WICHTIG! Vor Gebrauch sorgfältig lesen und für weiteren Gebrauch bereithalten.

WARNUNG:

- Ihr Gleichgewicht kann durch Ihre eigene Bewegung und die des/der Kindes/Kinder stark beeinträchtigt werden
- Sorgfalt ist angebracht beim Bücken oder bei Bewegungen (vorwärts oder seitlich)
- Dieses Tragesystem ist nicht geeignet während sportlicher Aktivitäten

Einsetzbar nur zum vorgesehenen Gebrauch:

Der NEWBORN BABY MOVER[®] ist eine professionelle Schürze zum Einsatz bei Feuer-Rettungsaktionen, die für die Notfallrettung von Frühgeborene eingesetzt wird, um diese an einen sicheren Ort zu transportieren. Im Brand- oder anderen Notfällen können bis zu drei Babys bei einem Gewicht bis maximal 5 kg pro Kind aus einem Gebäude oder anderen Situationen gerettet werden. Der NEWBORN BABY MOVER[®] ist für den Einsatz in den oben aufgeführten Situationen zu benutzen.

Bedienungsanleitung:

A: Vorbereitung

- Den NEWBORN BABY MOVER[®] aus der Verpackung entfernen und an einen bekannten Platz anbringen, der im Notfall leicht und schnell zu erreichen ist.
- Der NEWBORN BABY MOVER[®] ist vor Feuchtigkeit, Hitze, starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Vergewissern Sie sich, dass die Taschen des NEWBORN BABY MOVER[®] stets geleert sind. Dies wird die Nutzungsdauer des NEWBORN BABY MOVER[®] verlängern.
- Den NEWBORN BABY MOVER[®] außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Baby-Mover B.V. übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch des NEWBORN BABY MOVER[®] oder anderweitigem Einsatz als oben beschrieben.
- Bei eventuellen monatlichen Feuer- und Rettungsübungen kann es nach einigen Jahren zu Gebrauchs- und Riss-Spuren am NEWBORN BABY MOVER[®] kommen.
- Daher den NEWBORN BABY MOVER[®] regelmäßig auf Schäden bzw. Gebrauchsspuren überprüfen.
- Melden Sie unverzüglich jeden Schaden an Baby-Mover B.V. und versuchen Sie niemals selber diesen zu reparieren! Falls möglich sollte das Szenario, beschrieben wie in Absatz B, mindestens einmal pro Monat durchgeführt werden.

B: Im Notfall

- Zuerst wird der Retter seinen Kopf und Arme durch die vorgesehenen Öffnungen in den NEWBORN BABY MOVER[®] durchführen, sodass sich die Taschen an der Vorderseite befinden. Die Babys werden in die vorhandenen Taschen gemäß nachfolgender Anweisung platziert
- Versuchen Sie das Gewicht gleichmäßig auf die drei Taschen zu verteilen.
- Platzieren Sie das Baby horizontal in die Tasche mit dem Gesicht zum Mull (schwarze offener gewebter Stoff)

- Schließen Sie die Taschen ab mit dem Clipverschluss. Kann auch fest oder lockern abgestellt werden.
- Die Tasche, in der sich ein Kind befindet, darf wegen Erstickungsgefahr nie komplett verschlossen sein.
- Der NEWBORN BABY MOVER[®] ist aus feuerfestem Material gefertigt. Es sollte so wenig entzündliches Material wie möglich mit dem NEWBORN BABY MOVER[®] oder den dazugehörigen Taschen in Kontakt kommen.
- Schenken Sie den Kindern höchste Aufmerksamkeit, während Sie sie tragen.
- Verwenden Sie keine (heißen) Getränke oder Speisen, während Sie Kinder transportieren.

Pflegeanleitung:



Garantie:

Baby-Mover B.V. übernimmt die Garantie für die einwandfreie Funktion des NEWBORN BABY MOVER[®] und der Nutzbarkeit der Materialien für eine Dauer von 5 Jahren ab dem Verkaufsdatum. Der NEWBORN BABY MOVER[®] wird mit äußerster Sorgfalt hergestellt. Sowohl das Material als auch die Konstruktion wurden gründlich getestet auf Qualität und Gebrauch. Die Garantie ist gültig nur bei striktem Befolgen der Gebrauchsanweisung wie oben beschrieben. Im Falle von Schaden behält sich Baby-Mover B.V. das Recht der Entscheidung auf Reparatur, Ersatz oder Erstattung des Verkaufspreises des NEWBORN BABY MOVER[®] vor. Reklamationen betreff irgendwelcher Schäden müssen in schriftlicher Form an Baby-Mover B.V. innerhalb von 5 Wochen nach Auftreten des Fehlers eingereicht werden. Der schadhafte NEWBORN BABY MOVER[®] muss zusammen mit dem Brief eingeschickt werden. Die Garantie erlischt im Falle einer unsachgemäßen Benutzung. Kein Anspruch auf Garantie besteht, falls Änderungen oder Reparaturen an dem NEWBORN BABY MOVER[®] durch andere Personen als Baby-Mover B.V. Angestellte durchgeführt werden.

Haftbarkeit:

Baby-Mover B.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch von NEWBORN BABY MOVER[®] oder für einen anderen als oben beschriebenen Einsatz.

Baby-Mover B.V. haftet nicht für sichtbare Schäden, die nicht in der Garantiezeit angezeigt wurden.

Hersteller:

Baby-Mover B.V.
Rijnstraat 24
4191 CL Geldermalsen
Die Niederlande